

La chaise **HEBIX**®

Aide au levage mobile et/ou pliable.

aacurat
EASYMOBILITY



Imaginez une situation quotidienne à la maison dans l'appartement des personnes âgées. Une personne se promène dans l'appartement, tombe et ne peut plus se relever seule. C'est une tâche presque impossible pour le partenaire ou le soignant ambulatoire appelé à l'aide de soulever la personne du sol sans aucune aide.

Plus de problème avec le HEBIX innovant et léger d'aacurat !
L'aide au levage mobile et simple HEBIX est léger (env. 10,5 kg) et pliable. Il peut être facilement logé même dans le plus petit véhicule et est prêt à l'emploi à tout moment, n'importe où. En quelques étapes simples, HEBIX peut être ouvert et placé sur la personne allongée sur le sol. Le facteur décisif ici est que la force requise ne représente qu'environ un quart du poids corporel de la personne à soulever - pour une personne pesant 80 kg, elle n'est que d'environ 20 kg.

En soulevant simplement l'HEBIX par les poignées, vous pouvez amener la personne allongée en douceur et sans douleur en position assise. Elle peut rester dans cette position, se tenir debout ou être déplacée - rien de plus simple !



Voici étape par étape comment appliquer l'aide au levage HEBIX sur la personne tombée. Après le montage simple et rapide, HEBIX peut facilement être mis sur la personne.

En se reposant et en ajustant l'appui-tête, la personne tombée est soulevée aussi confortablement que possible. La ceinture de sécurité intégrée empêche de glisser sur le siège.

Repose-pieds sûr et innovant...

Les pieds d'appui innovants de l'aide au levage **HEBIX**® se replient automatiquement en position d'appui dès que la position verticale est atteinte lors du levage.

HEBIX® est alors autonome et l'assistant peut se concentrer entièrement sur la personne à soulever.



Aide au levage HEBIX pliable n° d'article: 7700000

Poids patient max 100 kg

Dimensions environ 75 x 45 x 15 cm

Poids environ 10,5 kg

Matériau Surface thermolaquée

Fabriqué en Allemagne

Sac de transport n° d'article 700001

Sangle de poitrine n° d'article 7770120

Aide au levage HEBIX n° d'article 7800000

Poids patient max 100 kg

Dimensions environ 75 x 38 cm

Poids environ 7 kg

Matériau Surface thermolaquée

Fabriqué en Allemagne

Verticalisateur **transit**®


aacurat
EASYMOBILITY

Le verticalisateur qui ne requiert ni harnais ni sangle dans la plupart des cas.

- Pour déplacer un patient d'une position assise à une autre, facilement et rapidement.
- Le patient est soulevé délicatement par les aisselles, en toute sécurité, grâce à des supports axillaires rembourrés et ergonomiques.
- Le **transit**® ne requiert ni toile ni sangle, lesquelles peuvent gêner lorsqu'il faut enfiler ou retirer des vêtements.
- L'utilisation de l'interrupteur manuel permet de soulever et de redéposer le patient en douceur.
- L'écartement électrique du châssis facilite l'approche, même si la chaise roulante ou le siège est large.



N° d'article 8275001

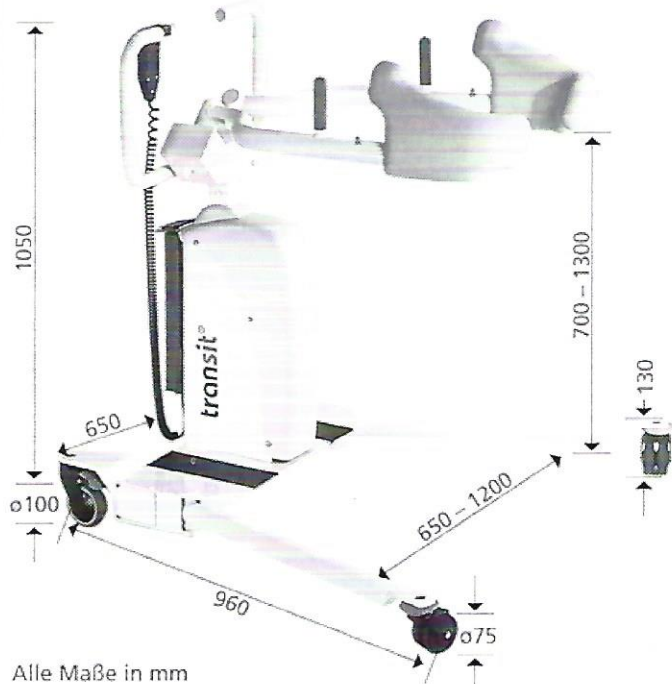

Alle Maße in mm

- Hauteur réduite du châssis pour passer sous une hauteur (ü) de 90 mm
- De longues béquilles axillaires +200 mm
- Modèle stationnaire De plus grandes roulettes pour les sols difficiles



Ceinture Transit® TRG-E, 1 pièce
N° d'article 8277100
Assure le maintien des cuisses et du postérieur, réglable en continu

Détails techniques du verticalisateur **transit**®
Capacité : 160 kg ; Vitesse de levage : env. 40 mm/s
Levage et écartement avec un moteur électrique 24 V
Alimentation : batterie et câble de recharge,
Contrôle avec un interrupteur manuel.
Type de protection IP 43
Poids : env. 63 kg



Cale-tibias
N° d'article 8276000
Mousse PUR,
hauteur et longueur réglables
Sangle pour tibias
N° d'article 8276100
Pour la fixation au cale-tibias



Ceinture Transit® TRG-Z
2 pièces
N° d'article 8277200



Entretoises
N° d'article 8277000
Réglable en continu, réduit la charge sur le buste

Indications : Empêchement significatif ou total de changer la position du corps ou de se déplacer, le plus souvent du fait d'altérations neuromusculaires, d'amputation d'une extrémité inférieure ou de maladies neurologiques.
Aide l'auxiliaire de vie lors des changements de position et du transport sur de courtes distances, au sein du logement.

Le soulève personne CURATOR®

aacurat
EASYMOBILITY

Portable d'une pièce à l'autre.


Dans le cas de patients nécessitant des soins, il est important de pouvoir les transporter en douceur et en toute sécurité d'un endroit à un autre et au-dessus de tout obstacle. Un produit intelligent et peu encombrant prêt pour vous.

La construction est facile à installer avec des options de montage individuelles sur le mur ou librement dans la pièce. Le soulève personne CURATOR est à la fois stationnaire et mobile.

En accrochant et en décrochant simplement, le soulève personne peut être utilisé dans toutes les pièces où des supports muraux sont fixés. Il peut être facilement transporté grâce à ses roulettes à chaque extrémités.

Le CURATOR est fabriqué à partir de matériaux non corrosifs de haute qualité. Cela garantit une longue durée de vie. De plus, le CURATOR est un poids plume absolu. Après avoir soulevé la personne, tourner, pivoter, soulever et déposer sont possibles d'une seule main ! Les boutons de commande sont simplement intégrés dans la poignée de transport grâce à un nouveau design de poignée.

CURATOR peut être utilisé partout où il est nécessaire dans la vie de tous les jours.

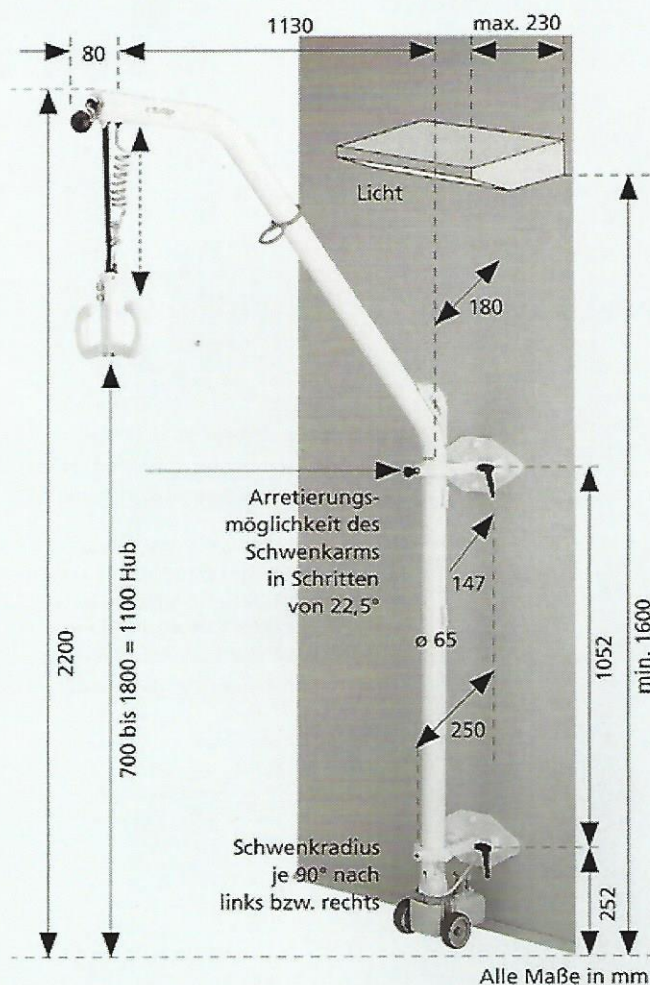

Le soulève personne CURATOR® N° d'article 8235001

Capacité de charge : 140 kg
Vitesse de levage : environ 20 mm/s
Entraînement : moteur électrique 230 V / 50 Hz ; 180 W ; 0.8A
Cycle de service : 1 mn / 9 mn.
Degré de protection : IP 56
Raccordement électrique : 3,5 m de câble à prise
Commande : boutons pneumatiques intégrés dans la poignée
Matériau : acier inoxydable ou aluminium
Moyens de portage : sangle résistante à l'usure
Finition : revêtement en poudre
Couleur : blanc pur RAL 9010
Poids : environ 20kg
Abaissement d'urgence mécanique
Fabriqué en Allemagne


Balance suspendue électrique
Numéro d'article 8235002
Complet avec suspension et poignée
Capacité de charge jusqu'à 140 kg
tractables.
Fonctionne avec télécommande à piles.



Les fixations pour le CURATOR®

aacurat
EASYMOBILITY

Jeu de supports muraux WHS-30

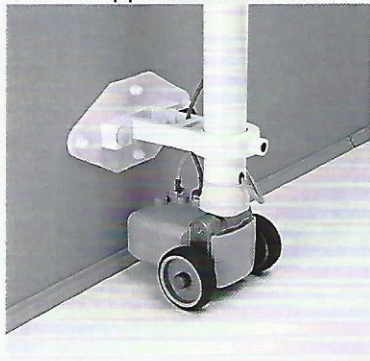

N° d'article 8267201

Pour maçonnerie pleine : brique pleine, pierre pleine, béton léger, pierre naturelle, pierre ponce pleine (béton B25)

Pour maçonnerie creuse : brique perforée verticale, brique perforée silico-calcaire, béton léger compl. avec mortier composé et vis.

Entretoises possibles : toutes DZ-P

Support sol-mur CWS



Numéro d'article 8269802

Le support sol-mur est monté au sol et au mur. Particulièrement adapté lorsque des obstacles plus importants (par exemple des radiateurs) empêchent une fixation directe au mur.

Jeu de supports muraux WHS-16.5



N° d'article 8223701

Pour béton de maçonnerie pleine B25 compl. avec des chevilles.

Entretoises possibles : toutes DZ

Stand libre CFS




N° d'article 8239601

La construction autoportante stable est fixée au sol.

Accrocher et réaccrocher est possible en quelques étapes simples, tout comme sur le mur. Complet avec mortier composé et vis

Support sol-plafond CDS

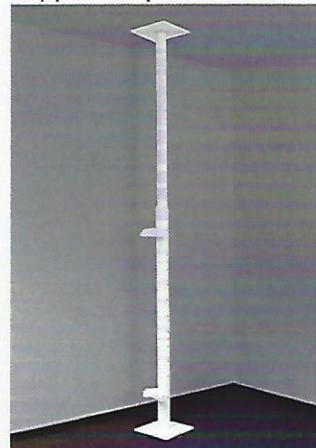

N° d'article 8234301

Le support du sol au plafond pour une installation indépendante du mur est simplement serré entre le sol et le plafond.

Jeu de supports muraux WHS-80



N° d'article 8267301


Jeu de supports muraux WHS-80-E CURATOR un côté mural.

N° d'article 8267401

WHS-80-B Support mural CURATOR fixé des deux côtés du mur pour la construction de poteaux / plaques de plâtre (par ex. Rigips), double revêtement des deux côtés

Montage vissé pour des épaisseurs de mur jusqu'à 21,5 cm maximum
Entretoises possibles : toutes DZ-P

Entretoise

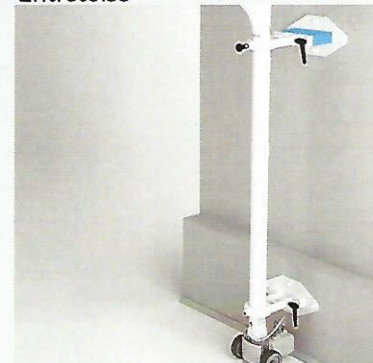

Différentes distances du mur peuvent être facilement comblées avec des entretoises appropriées.

N° d'article 8233601 DZ 10 x 165 mm

N° d'article 8233701 DZ 20 x 165 mm

N° d'article 8233801 DZ 40 x 230 mm

N° d'article 8233901 DZ 80 x 230 mm

N° d'article 8206901 DZ 100 x 270 mm

Plus d'entretoises sur demande.